

BACTICID AF

ALKOHOLI BAASIL KIIRDEINFEKTSIONIVAHEND MEDITSIINISEADMETELE

BACTICID AF on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib kasutamiseks kohtades, kus on nõutav regulaarne kiirdesinfektsioon. Valmislahusena, on seda mugav kasutada.



BACTICID AF on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), virutsiidse (sh kõik ümbrisega viirused nagu HBV, HIV, HCV ning ümbriseta Adeno-, Noro- Polio- ja Vacciniaviirus), fungitsiidse ja pärmseentevastane toimega.

KASUTUSALA:

BACTICID AF on efektiivne vahend meditsiiniseadmete kiireks desinfektsiooniks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks, nagu näiteks:

- Haiglad ja teised tervishoiuasutused
- Operatsioonisaalida ja protseduuriruumid
- Intensiivpalatid
- Erakorralise meditsiini osakonnad
- Dialüüsiosakonnad
- Perearstid ja esmaabi
- Polikliinikud
- Laboratooriumid
- Hambaarsti kabinetid
- Patsientide koduhooldus
- Toiduainete tööstus ja suurtööstused
- Ravimi- ja kosmeetikatööstus

KASUTAMINE:

BACTICID AF on valmislahus ja ei vaja lahjendamist. Kantakse pinnale niisutatud lapi või pihustiga.

Pinna desinfitseerimine pühkimisega: niisutada ühekordne mittekootud rätik BACTICID AF-ga ja pühkida sellega pinda.

Pinna desinfitseerimine pihustades: pihustada BACTICID AF pinnale kuni 30 cm kauguselt. Soovitav kasutada raskesti ligipääsetavate pindade puhul.

BACTICID AF on efektiivne kiirdesinfektsioonivahend erinevate meditsiiniinstrumentide ja pindade desinfitseerimiseks nagu operatsioonilauad, kandraamid, ratastoolid, kandikud, kärud ja haiglavoodid.

MIKROBIOLOOGIA:

Mikroorganism	Ettevalmistus	Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek.
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek.
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrae	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium avium	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Kõik ümbriisega viirused (k.a HBV/HCV, HIV, Vaccinia)	lahjendamata	15 sek
Adeno virus	lahjendamata	30 sek
Noro virus	lahjendamata	15 sek
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)	lahendamata	30 sek

BACTICID AF on testitud järgmiste Euroopa Liidu standardite järgi: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Vahend ja selle aurud on väga tuleohtlikud! Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Hoida pakend suletuna! Kasutada kaitsekindaid!
Säilitada hästi ventileeritavas ruumis! Hoida jahedas!
Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.

KOOSTIS:

100g toodet sisaldab: etanool 57g, isopropanool 6g

Registreeritud Raviameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile




PAKENDID:



500ml
pihustuspudel



1000ml
pihustuspudel

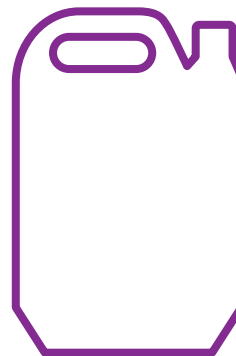

5000ml
kanister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com