

CLEAN FOAM

DESINFITSEERIV PUHASTUSVAHT PINDADELE

Clean Foam on kasutusvalmis desinfitseeriv puhastusvaht mitteinvasiivsete medistiiniseadmete ja teiste alkoholi suhtes tundlike pindade puhastamiseks. Clean Foam ei sisalda alkohole, aldehüüde ega PHMB (biguaanid) ja on kasutatav kõigi vett taluvate pindade puhastamiseks. Toode kantakse pinnale vahu vormis, mis teeb tema kasutamise mugavaks ja ökonoomseks. Clean Foam on hästi materjalisõbralik.



Clean Foam omab bakteritsiidset ja fungitsiidset toimet, hävitab grampositiivseid ja gramnegatiivseid baktereid. Toode toimib samuti ümbrisega viiruste suhtes (k.a HBV, HIV, HCV)

KASUTUSKOHAD:

Clean Foam sobib kasutamiseks haiglates, hambaravikliinikutes, hooldekodudes, laboratooriumites, psühhoterapias, perearstikeskustes jm.

Clean Foam on eriti sobiv hambaravikliinikutes patsienditoolide jm pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, mis on valmistatud kas nahast või kunstnahast. Toode sobib kasutada ka meditsiini-seadmete akrüülpindadel.

Vahustamine pinnale toimub ilma survegaasita, mis on kasutajale ja keskkonnale ohutu.

KASUTAMINE:

Töödeldavale pinnale pihustada piisav kogus Clean Foam vahu ja ajada lapiga laiali. Veenduda, et pind on ühtlaselt kaetud. Toime saavutamiseks peab pind olema visuaalselt märg vähemalt 1 minut! Töödeldud pinna loputamine ei ole vajalik.

Clean Foam vastab Euroopa standardi **EN13727** nõutele.



KOOSTIS:

100g toodet sisaldab järgmisi toimeaineid:

Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride 0,125g ; Alkyl (C12-C14) ethylbenzylammonium chloride 0,125g

PACKAGING:



1000 ml
vahupihustiga pudel



5000 ml
kanister

