

STERISEPT INSTRU

Aldehüüdivaba kõrgastme meditsiiniinstrumentide
puhastus- ja desinfektsioonivahend

- Fenooli-, aldehüüdi- ja fosfaadivaba
- Lai mikrobioloogilise toime spekter
- Sobiv erinevate pinnamaterjalidega
- Hea puhastustoime



Sterisept Instru on vahend termostabiilsete- ja labiilsete meditsiiniinstrumentide desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks. Toode omab samaaegselt nii pesevat kui ka desinfitseerivat toimet, mis teeb selle sobivaks kirurgiliste ja hambaraviinstrumentide ning jäikade endoskoopide eeltööt-luseks ning vähemkriitiliste meditsiiniseadmete lõplikuks desinfektsiooniks. Toode on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks!

Sterisept Instru on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), fungitsiidse ja pärmseentevastane toimega. Toode omab toimet samuti viiruste (k.a HBV, HIV, HCV, Vaccinia ja Rota) ja spooride (k.a Clostridium difficile) suhtes.

Tänu spetsiaalsetele toime- ja pindaktiivsetele ainetele on toode materjalisõbralik ja omab samas head pesutoimet. Sterisept Instru eemaldab efektiivselt meditsiiniinstrumentidelt verd, proteiine, sekrete ja rasva. Lühike toimeaeg ja madal kasutuskontsentratsioon tagavad toote säästliku kasutamise.

KASUTUSKOHAD:

Sterisept Instru 't kasutatakse haiglates, laboratooriumites, hambaravikliinikutes ja teistes tervishoiuasutustes.

Toodet kasutatakse manuaalseks desinfektsiooniks, termostabiilsete- ja labiilsete meditsiiniinstru-mentide ning laboriseadmete desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks mh jäigad endoskoo-bid, bronhoskoobid, larüngoskoobid, biopsia instrumendid, intubatsioonitorud, neerukausid, vood-inõud, pintsetid, käärid, laboriinstrumendid, stomatoloogilised instrumendid, abiseadmed jne.

Sterisept Instru sobib samuti kasutamiseks ultrahelivannides.

Tootega võib töödelda instrumente, mis on valmistatud roostevabast terasest, klaasist, alumiiniu-mist, keraamikast, jäigast kummist ja jäigast plastikust.

KASUTAMINE:

Sterisept Instru on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale toimele (vt. tabel).

Instrumentide desinfektsioon ja pesu leotusmeetodil:

Peale kasutust asetä eelnevalt lahtivõetud instrumendid Sterisept Instru toatemperatuuril töölahusesse. Näiteks 0,5% töölahuse saamiseks lisada 5ml.

Instrumentide desinfektsioon ja pesu ultrahelimeetodil:

Sterisept Instru on kasutatav ka roostevabast terasest ultrahelivannides. Lahuse valmistamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda ka seadmevalmistaja juhendist ning lahust mitte kuumutada.

Valmissegatud töölahus on sõltuvalt kasutuskooormusest kõlblik kuni 14 päeva. Kui lahus on visuaalselt kontamineerunud, tuleb see koheselt välja vahetada. Tähelepanu- Sterisept Instru ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega! Vältida aldehüüde sisaldava aine kasutamist enne ja pärast Sterisept Instru-ga desinfitseerimist!

TOIME	TESTI MEETOD	TOIMEAEG / KONSENTRATSIOON			
		5 min	15 min	30 min	60 min
Bakteritsiidne (sh. MRSA, VRE)	EN13727	0,5%	0,25%		
Bakteritsiidne	EN14561		0,5%	0,25%	
Pärmseentevastane	EN13624	0,5%	0,25%		
	EN14562	0,5%	0,25%		
Fungitsiidne	EN13624			1%	0,5%
Mükobakteritsiidne	EN14348		0,5%		
Mükobakteritsiidne	EN14563			0,5%	
Kõik ümbri sega viirused	EN14476	0,5%	0,25%		
Rotaviirus	EN14476		0,75%		
Noroviirus	EN14476		1%		
Spoorigid (clostridium difficile)	EN13704				3%*

*puhastes tingimustes

KOOSTIS:

100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 15g ;
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 15g

ETTEVAATUST.

Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Aure mitte sisse hingata.

Vältida sattumist keskkonda.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.


ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.


SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele.

PAKENDID:

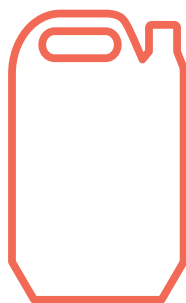

5000ml kanister

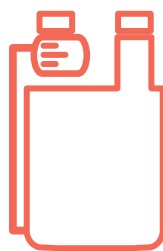

1000ml plastpudel
doseerimiskambriga

CE
0537



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Harjumaa, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com